



Ficha técnica

Anillos Barrera Adapt Convexos CeraRing™
infundidos con ceramidas



CeraRing™

Ostomy Products

Anillos Barrera Adapt Convexos CeraRing™

Descripción

Los Anillos CeraRing™ contienen **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Están diseñados para mantener las propiedades adhesivas y de adsorción, así como a **proteger la barrera de humedad natural** y mantener una **buena salud de la piel periestomal desde el primer día**.

Usos frecuentes

La superficie convexa del anillo de barrera está diseñada para mejorar el ajuste alrededor del estoma curvándose hacia la piel periestomal y aumentar la profundidad de la lámina.

Se pueden usar de forma individual o apilados para

- construir un nivel personalizado de convexidad
- generar una convexidad flexible, junto a una lámina plana
- obtener una convexidad profunda con una lámina convexa necesaria para para ciertos abdómenes o estomas

¿Cómo puedo saber qué tamaño de anillo de usar?

Seleccione el tamaño del anillo más cercano al tamaño del estoma. Los anillos pueden estirarse ligeramente, pero no sobrepase las siguientes recomendaciones:


Referencia	Diámetro interno	No estirar más de:
89520	20 mm	26 mm
89530	30 mm	36 mm

Aplicaciones

•Se puede **cortar** para conseguir una máxima adaptación en estomas mal posicionados o pliegues cutáneos.

•Los anillos convexos Adapt se pueden **doblar** con facilidad para una mejor adaptación.

•El anillo convexo Adapt se puede estirar ligeramente para adaptarlo a un **estoma ovalado**.

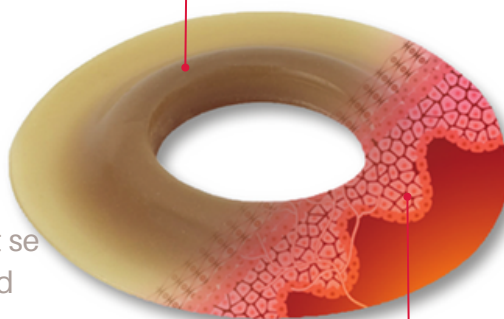

• Los anillos de barrera **Adapt CeraRing™** están infundidos con ceramida.

• Su formulación **FlexTend** compuesta por elástomero, hidrocoloide y entrecruzamiento físico (SIS) tiene gran capacidad de absorción y resistencia.

Se hincha cuando entra en contacto con el efluente para brindar una mayor sensación de seguridad.

Hidrocoloide infundido con ceramidas

Anillos Barrera Adapt Convexos CeraRing™

Componentes

Componente	Material
Anillo Barrera	Hidrocoloide infundido en Ceramidas
Revestimiento protector	Película de Polipropileno-etileno recubierto de silicona
Revestimiento de papel:	Papel blanqueado – Recubrimiento de silicona recubierto de polietileno por un lado
Envase:	Poliestireno

No contienen alcohol. No contienen látex.

Caducidad: 5 años



Tabla de referencias

	Descripción	Ancho	C.N.	Ref.	Caja
	Anillo Barrera Convexo con Ceramidas	17 - 26 mm	497883	89520	10 uds
		27 - 36 mm	497891	89530	10 uds

Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.

Dimensiones de la unidad mínima de venta:

Referencia 89520: 19 cm x 10 cm x 3,5 cm (largo x ancho x alto)

Referencia 89530: 19 cm x 10 cm x 3,5 cm (largo x ancho x al

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

El logo de Hollister, CeraPlus y CeraRing son marcas registradas de Hollister Incorporated

©Hollister España Mayo 2023



*Remois es una tecnología de Alcare Co., Ltd.



Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27

www.hollister.es