



Filtro: AF300 con doble membrana contrapuesta. Elimina el mal olor e incrementa la salida del flujo de aire de una forma rápida e equilibrada. Duradero y listo para usar.

Adhesivo con cámaras de aire: continuo descanso y recuperación de la piel en cada aplicación.

Adhesivo SoftFlex: equilibrio entre adherencia y protección cutánea con fibras de algodón, para dispositivos de aplicación y retirada continuada.

Forma anatómica: para ajuste en zona inguinal.

Cubierta de tela Non-Woven: máxima suavidad con tela "sin tejer" que permite la transpiración de la piel.

Capas anti-olor y anti-ruido: cuatro capas coextruidas permiten eliminar el mal olor y los ruidos inducidos por el movimiento.


Volumen	Color	Estoma	C.N.	Referencia
Midi 550 ml	Opaca			
		≤ 15-55 mm	490417	22100
		25 mm	490367	22125
		30 mm	490375	22130
		35 mm	490383	22135
		40 mm	490391	22140
		45 mm	490409	22145
	Transparente			
		≤ 15-55 mm	490425	22500

Volumen	Color	Estoma	C.N.	Referencia
Maxi 700 ml	Opaca			
		≤ 15-55 mm	496091	22300
		25 mm	496109	22325
		30 mm	496117	22330
		35 mm	496125	22335
	Transparente			
		≤ 15-55 mm	496133	22400

Presentación: caja con 30 bolsas + 30 anillos de microporo
Financiado por el S.N.S.

Descripción:

- Lámina adhesiva SoftFlex:
 - Elastómero: Poliisobutileno (PIB).
 - Hidrocoloide: Carboximetilcelulosa Sódica, Pectina, Gelatina.
 - Componentes adicionales: fibras de algodón.
- Revestimiento protector de la lámina: polietileno transparente de alta densidad.
- Paredes de la bolsa: película coextruida de 4 capas (antiolor y antirruidos), con un espesor de 75 micras. Tela sin tejer Non-Woven.
- Filtro: carbono activado encapsulado en membrana impermeable a los líquidos.
- Volumen: Midi 550 ml, Maxi 700 ml.
- **Ningún componente contiene Látex.**

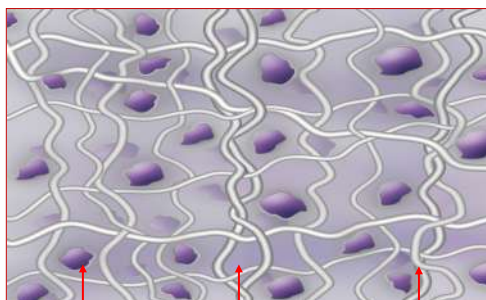


Hidrocoloide Elastómero Fibras Algodón

Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina **SoftFlex** es un excelente protector cutáneo, muy flexible, por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales. Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión.

La lámina incorpora la tecnología “cámaras de aire”, que consiste en una serie de hendiduras o espacios de aire en la superficie de la misma que permiten a la piel periestomal recuperarse tras cada aplicación.

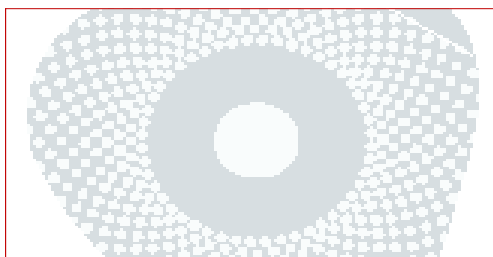

Seguridad Perfecta


La forma invertida proporciona una mayor superficie de adhesivo en las zonas donde existe una mayor tracción.

El espesor de la lámina es igual por toda la superficie, siendo de 0,76 mm. Las dimensiones de la lámina son de 10,16 cm., tanto de ancho como de largo.



Suavidad total Non-Woven

Un tejido “sin tejer” en ambos lados recubre la bolsa en la variante opaca, y en la transparente, por el lado en contacto con el cuerpo, de color beige, cuya función es aumentar la discreción y el confort al ser de tacto agradable y transpirable.

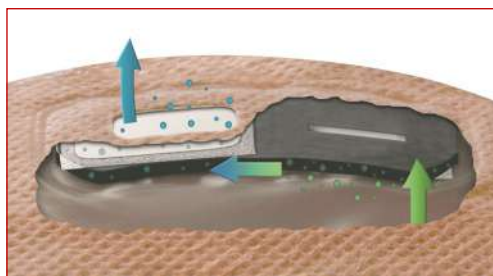

Sin Olor: AF300 con Doble Membrana Contrapuesta

El filtro **AF300** es único por su eficacia en la incorporación de nuevos materiales como membranas impermeables a líquidos y Carbón Activado; modificado químicamente. Incrementa el flujo de aire para evitar el efecto globo, pero permite un equilibrio unidireccional para contrarrestar el efecto colapso. No mancha, es limpio y dura hasta 4 días a una profundidad de 1,8 m. Está listo para su uso, no necesita manipulación, ni cubre-filtros.



Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

Presentación: caja con 30 bolsas + 30 anillos de microporo

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 8,1cm alto

Caducidad: 5 años



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

ENERO 2020