

## Polvo Adapt



Descripción	C.N.	Referencia
Polvo Adapt	169581	7906

Presentación: bote 28 gr.

Producto no financiado por el S.N.S.

### DESCRIPCIÓN

El Polvo Adapt es un compuesto sintético hidrocoloide que ofrece una protección a la piel dañada y contribuye a la regeneración de la misma en caso de irritación úlceras, llagas, heridas abiertas, heridas de cicatrización por segunda intención, fístulas, etc. No contiene alcohol.

#### Causas habituales de lesiones de la piel periestomal:

- Fugas de heces u orina.
- Elección incorrecta del diámetro de la lámina adhesiva, recortable o pre-recortada.
- Sensibilidad frente a alguno de los productos utilizados.
- Cambio del dispositivo demasiado frecuente, dañando la capa superficial de la dermis.
- Heridas o cicatrices resultantes de la operación.

### COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Pectina, gelatina, carboximetilcelulosa sódica.

No contiene látex.

No contiene alcohol.

⇒ El contenido de humedad no superará el 12.0%.

⇒ Presenta un ph entre 4.5 y 6.0.

## ¿CÓMO APLICAR POLVO ADAPT?

1. Realizar la higiene del estoma y secar la piel periestomal con suavidad y sin frotar.
2. Aplicar una pequeña cantidad de Polvo Adapt, cubriendo por completo la zona irritada. Dejar actuar de 2 a 3 minutos.
3. Eliminar cuidadosamente los restos excedentes aplicando aire con la mano, con un abanico, o con un pañuelo de celulosa o soplando sobre la piel directamente. El polvo que queda pegado es el necesario para regenerar la piel.
4. Colocar el dispositivo de ostomía de forma habitual.



Piel periestomal irritada



Aplicar Polvo Adapt



Eliminar restos excedentes



Colocar dispositivo habitual

Suspender su uso si la irritación ha desaparecido y la piel se encuentra completamente recuperada.

---

**Unidad mínima de venta:** 1 caja con un bote de 28 gr.

**Dimensiones de la unidad mínima de venta:** 4,5 cm x 4,5 cm x 11,5 cm (largo x ancho x alto)

**Caducidad:** 5 años



Hollister Ibérica S.A.  
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D  
28108 Alcobendas (Madrid)  
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01  
www.hollister.es

2020