

Desodorante-Lubrificador Adapt



| Descripción | C.N. | Referencia |
|--------------------------------|--------|------------|
| Desodorante-Lubrificador Adapt | 159875 | 78500 |

Presentación: caja con 1 botella de 236 ml.
Producto no financiado por el S.N.S.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Accesorio de ostomía que combina dos usos diferentes en un solo producto:

1. Elimina el mal olor a través de su neutralización.
2. Facilita el vaciado del contenido. Evita el efecto “vacío” de las bolsas al lubricar las paredes.

Además ,no irrita, no contiene perfumes ni sustancias que enmascaren el olor y no mancha.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Agua purificada, propilenglicol, poloxamer 188NF, N-Etil-N-Soya morfolino etosulfato, hidroxietilcelulosa, octoxinol-9, fenoxietanol, metilparabén, etilparabén, butilparabén, propilparabén, isobutilparabén, hidroxido de sodio.

PRUEBAS REALIZADAS

Los materiales utilizados son seguros y biocompatibles para el ser humano, según los siguientes tests realizados y superados: prueba ISO de irritación vaginal, test de temperatura a 40-60°C., test de neutralización de olor, test de efectos sobre lámina adhesiva, test de efectos sobre el dispositivo, test de lubricación.

MODO DE EMPLEO

⇒ Para bolsas cerradas

1. No retirar el protector transparente de la lámina antes de aplicar el desodorante-lubrificador.
2. Añadir aproximadamente 5ml. o una cucharadita a través del orificio de la lámina adhesiva.
3. Frotar la bolsa para recubrir bien su interior.
4. A continuación, retirar el protector transparente de la lámina y colocar la bolsa en el abdomen de forma habitual.

⇒ Para bolsas abiertas

1. Colocar la bolsa en el abdomen de forma habitual.
2. Añadir aproximadamente 5ml. o una cucharadita por la parte distal (abertura inferior) de la bolsa.
3. Frotar la bolsa para recubrir bien su interior.
4. Cerrar la bolsa.

Repetir los pasos 2 y 3 en cada vaciado.

PRECAUCIONES

Evite el contacto con la parte adhesiva de la lámina. No debe usarse con ningún otro producto que se incorpore a la bolsa. Si se produce algún tipo de irritación, dejar de utilizar el producto y lavar bien la zona.

Unidad mínima de venta: 1 caja con una botella de 236 ml.

Dimensiones de la unidad mínima de venta: 5,5 cm x 5 cm x 17 cm (largo x ancho x alto)

Caducidad: 2 años

Condiciones de almacenamiento:

- La temperatura de almacenaje no debe exceder de 30°C
- Evitar la luz directa



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es