

Cinturón ajustable Adapt™



Novedad !



Descripción	C.N.	Medida	Referencia
Cinturón ajustable	434373	58—109 cm	7300
Cinturón ajustable	488858	86—165 cm	7299

Presentación: caja con 1 unidad
Producto financiado por el S.N.S.

DESCRIPCIÓN

Cinturón elástico y ajustable, indicado para su utilización con dispositivos de ostomía con el objetivo de proporcionar una seguridad extra en la adaptación del dispositivo.

Se utiliza frecuentemente con sistemas convexos para aumentar su efecto.

No tiene componentes metálicos para no lastimar la piel.

En los extremos se encuentran dos enganches plásticos que se adaptan a la bolsa de ostomía, y un dispositivo, también de material plástico, para ajustar el cinturón a diferentes medidas de cadera.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Poliéster, algodón, goma y nylon

No contiene LÁTEX.

¿CÓMO UTILIZAR EL CINTURÓN AJUSTABLE?



1. Introducir uno de los extremos del cinturón en la presilla que encontramos en la bolsa de ostomía



2. Tirar del cinturón para encajarlo bien en la presilla



3. Pasar el cinturón por la espalda rodeando todo el torso



4. Ajustar la longitud del cinturón si es necesario



5. Introducir el extremo del cinturón en la presilla de la bolsa



6. Tirar del cinturón para dejarlo encajado en la presilla

Consejos:

- Especialmente necesario para abdomen blando y/o el estoma retraído
- Medir el perímetro abdominal para ajustar su longitud
- El cinturón debe estar ajustado pero no apretado para evitar áreas de presión



Unidad mínima de venta: 1 caja con 1 cinturón

Dimensiones de la unidad mínima de venta: 14,5 cm x 3,5 cm x 3,5 cm (largo x ancho x alto)



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

2020