


Bolsa Cerrada de 2 piezas

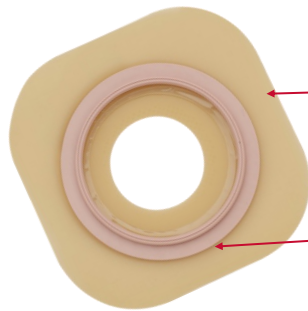

Adhesivo SoftFlex: equilibrio entre protección cutánea y adherencia. Con perfil decreciente y máxima flexibilidad para ajustes perfectos.

Anillo Flotante: atraumático al permitir el ajuste de la bolsa sin necesidad de realizar presión sobre el abdomen.



Filtro AF300 con doble membrana contrapuesta. Elimina el mal olor e incrementa la salida del flujo de aire de una forma rápida y equilibrada. Duradero y listo para usar.

Enganches para cinturón, y pestaña para facilitar la retirada de la bolsa.

Forma anatómica: para ajuste en zona inguinal.

Cubierta de tela Non-Woven: máxima suavidad con tela "sin tejer" que permite la transpiración de la piel.

Capas anti-olor y anti-ruido: cuatro capas coextrudadas permiten eliminar el mal olor y los ruidos inducidos por el movimiento.


Color	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Transp.	∅ 13-30 mm	45 mm		24522*
	∅ 13-40 mm	55 mm		25522*
	∅ 13-55 mm	70 mm		27522*

Presentación: Caja con 30 bolsas + 7 láminas


* Productos no financiados por SNS

Descripción:

- Lámina adhesiva SoftFlex
 - Elastómero: Poliisobutileno (PIB)
 - Hidrocoloide: Carboximetilcelulosa Sódica, Pectina, Gelatina.
 - Componentes adicionales: Fibras de algodón.
- Revestimiento protector de la lámina de polietileno transparente de alta densidad.
- Anillo flotante de Saranex 650.
- Aro de ajuste de lámina y bolsa de polietileno de baja densidad
- Paredes de la bolsa formada por una película coextruida de 4 capas (antiolor y antirruidos), con un espesor de 75 micras. Y tela sin tejer Non-Woven.
- Filtro de carbono activo encapsulado en membrana impermeable a los líquidos.
- Volumen: Midi 550 ml., Maxi 700 ml.
- **Ningún componente contiene Látex.**

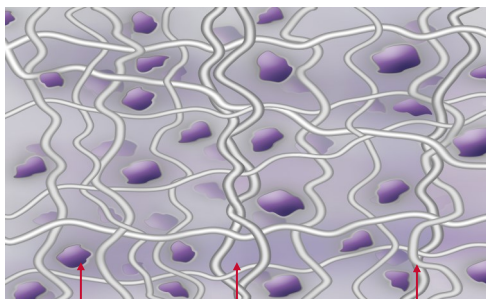

Hidrocoloide Elastómero Fibras Algodón

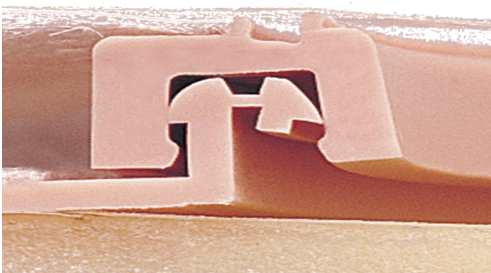


Máxima protección cutánea y adherencia

La lámina **SoftFlex** lavable es un excelente protector cutáneo, muy flexible por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales. Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión; con forma romboidal para situar más adhesivo en las zonas donde se forman los pliegues abdominales.

Ajuste Seguro con CPL

Conform2 tiene un sistema único de acople **CPL** –flexible y seguro-. El aro de la bolsa y de la lámina se bloquea de una manera muy sencilla. Un “Clic” audible nos asegura que la bolsa está firmemente sujeta, sin posibilidad de desprendimientos accidentales.

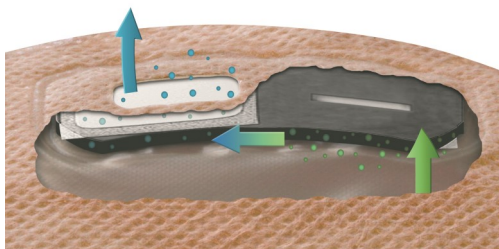



Sin Olor: AF300 con Doble Membrana Contrapuesta

El filtro **AF300** es único por su eficacia en la incorporación de nuevos materiales como membranas impermeables a los líquidos y Carbón Activado; modificado químicamente. Incrementa el flujo de aire para evitar el efecto globo, pero permite un equilibrio unidireccional para contrarrestar el efecto colapso. No mancha, es limpio y dura hasta 4 días a una profundidad de 1,8 m. Está listo para su uso, no necesita manipulación, ni cubre-filtros.

Suavidad total

Las bolsas están recubiertas por un tejido “sin tejer” en ambos lados en la variante opaca, y en la transparente, por el lado en contacto con el cuerpo, de color beige, cuya función es la de aumentar la discreción y el confort al ser de tacto agradable y suave con la piel.

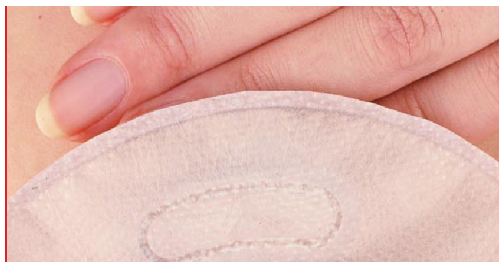

 Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

Presentación: caja con 30 bolsas + 7 láminas estándar

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 11,7cm alto (8,1cm alto ref. 24522)

Caducidad: 5 años



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

2020

Bolsa Urostomía de 2 piezas

“Ultra flexible. Ultra seguro”



Adhesivo Soft Flex: equilibrio entre protección cutánea y adherencia :Con perfil decreciente y máxima flexibilidad para ajustes perfectos.

Anillo flotante: atraumático al permitir el ajuste de la bolsa sin necesidad de realizar presión sobre el abdomen.

Enganches para cinturón, y pestaña para facilitar retirada de la bolsa

Cubierta de tela Non-Woven

Válvula anti-reflujo para evitar infecciones de orina.

Capas anti-olor y anti-ruido: cuatro capas coextrudadas permiten eliminar el mal olor y los ruidos inducidos por el movimiento.



Válvula de vaciado con indicador de cierre.



Incluye **adaptador universal**, permite fácil acople a las bolsas de orina de pierna y de noche.

Color	Medida	Aro	CN	Ref
Transp. 	≈13-55 mm	70 mm	/	*27832

Presentación: Caja con 30 bolsas + 7 láminas + 3 adaptadores
* No financiado por S.N.S


Foto	Tipo	Volumen	C.N.	Referencia
	Bolsa Cama			
	Sin válvula de vaciado	2000 cc	477315	9412
	Con válvula de vaciado	2000 cc	488122	9430
	Bolsa Pierna			
	Tubo corto: 35 cm	750 cc	476291	9035
	Tubo largo: 50 cm	750 cc	476309	9036

Presentación: Caja con 30 unidades
Financiado por S.N.S.

Bolsa Urostomía de 2 piezas

Descripción:


- Lámina adhesiva Soft Flex
 - Elastómero: Poliisobutileno (PIB).
 - Hidrocoloide: Carboximetilcelulosa Sódica, Pectina, Gelatina.
 - Componentes adicionales: Fibras de algodón.
 - Revestimiento protector de la lámina de polietileno transparente de alta densidad.
 - Anillo flotante de Saranex 650.
- Aro de ajuste de lámina y bolsa de polietileno de baja densidad
- Paredes de la bolsa formada por una película coextruida de 4 capas (antiolor y antiruidos), con un espesor de 75 micras. Y tela sin tejer Non-Wowen
- Válvula anti-reflujo de Saranex
- Válvula de vaciado de polietileno de alta y baja densidad
- Volumen midi 300 ml.
- **Ningún componente contiene Látex.** ↩

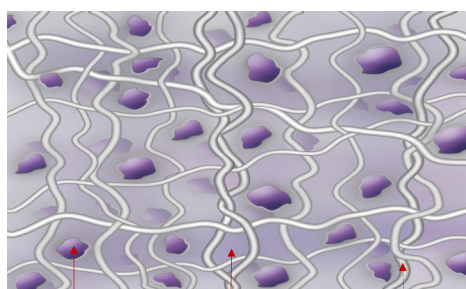

Hidrocoloide Elastómero Fibras Algodón


Máxima protección y adherencia

La lámina Soft Flex lavable es un excelente protector cutáneo, muy flexible por lo que se adapta perfectamente a los movimientos abdominales. Presenta perfil decreciente para asegurar una máxima adhesión; con forma romboidal para situar más adhesivo en las zonas donde se forman los pliegues abdominales.

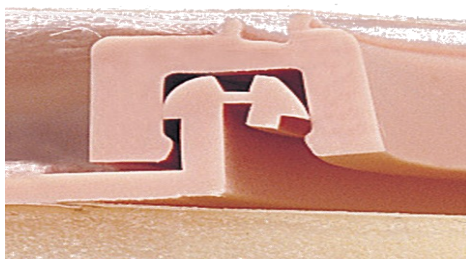

Ajuste Seguro

Conform2 tiene un sistema único de acople CPL –suave y seguro-. El aro de la bolsa y de la lámina se bloquea de una manera muy sencilla. Un “Clic” audible nos asegura que la bolsa está firmemente sujeta, sin posibilidad de desprendimientos accidentales.

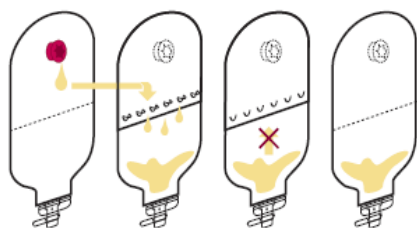

Anti-reflujo eficaz

La válvula anti-reflujo para bolsas de urostomía es un sistema de 3 capas que previene el reflujo, reduce el riesgo de infecciones, y la formación de cristales debidos al depósito de orina alrededor del estoma.



Válvula de vaciado con indicador de cierre

Regula el flujo de orina en el momento del vaciado de la bolsa. Presenta un diámetro lo suficientemente ancho para permitir el paso de cuerpos semisólidos como el mucus. Para indicar el estado de la bolsa (cerrada o abierta), la válvula presenta un indicador de cierre (gota dorada).



Como parte de nuestro compromiso con el medio ambiente, a partir de 2020 reducimos los niveles de cloro de la película plástica de nuestras bolsas.

Presentación: caja con 30 bolsas + 7 láminas estándar + 3 adaptadores

Dimensiones unidad mínima de venta: 23,3cm largo x 16,4cm ancho x 11,7cm alto

Caducidad: 5 años



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

2020