



Ficha técnica

Pack Conform 2 con Bolsa Abierta + Lámina* convexa CeraPlus™



Láminas
CeraPlus™

Conform 2 Bolsa abierta

Presillas para cinturón

- De fácil enganche
- En la misma bolsa para mayor seguridad

Filtro AF300

- Permite una salida lenta del gas y su desodorización
-

Paneles ComfortWear

- Un tejido "sin tejer", de color beige, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable.

Cierre integrado Lock 'n Roll con microcierres

- El cierre permite una manipulación muy **sencilla e intuitiva**. En tan solo tres pasos, se pliega sobre sí mismo y se cierra presionando la pestaña ligeramente, desde el centro hacia los extremos, quedando cerrado de modo **seguro** mediante los microcierres.
- Puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario y permite un **vaciado controlado** del contenido de la bolsa.
- Se trata de un cierre **higiénico** al permitir una limpieza completa con agua y jabón, y ofrece un gran confort y discreción al quedar replegado sobre sí mismo y adaptándose al contorno del cuerpo.

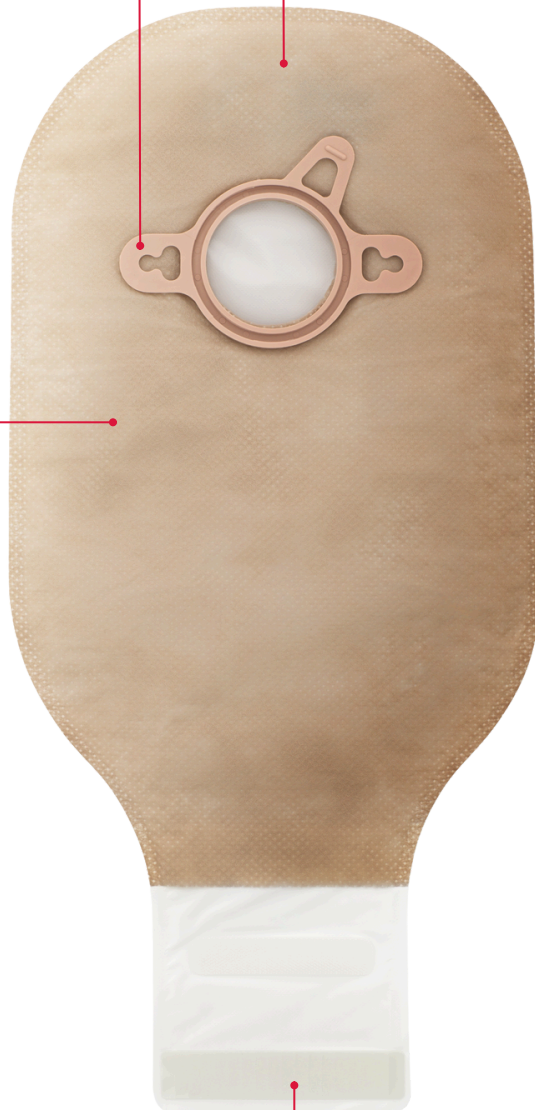


Lámina convexa CeraPlus™ + Bolsa abierta Conform 2

Descripción

La lámina CeraPlus™ está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Lo que significa elegir una lámina CeraPlus™



REDUCCIÓN RELATIVA

En el número de Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP)¹



MAYOR SATISFACCIÓN en la prevención del picor ¹



Significativamente **INFERIOR COSTE RESPECTO AL CUIDADO DEL ESTOMA** ¹



Significativamente **MÁS PROBABILIDAD DE RESOLVER CPP**



LA PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA se reduce ^{2,3}




Protección frente **A IRRITACIÓN Y DAÑO EN LA PIEL**

El rol de las ceramidas

Piel Sana

mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera

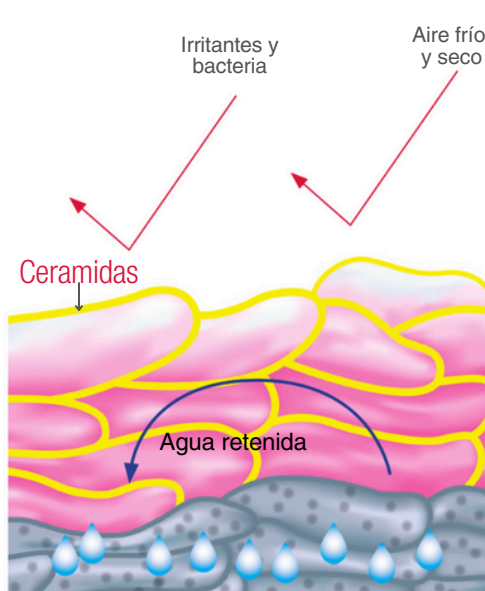


Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada

Permite la entrada de irritantes y la salida de agua

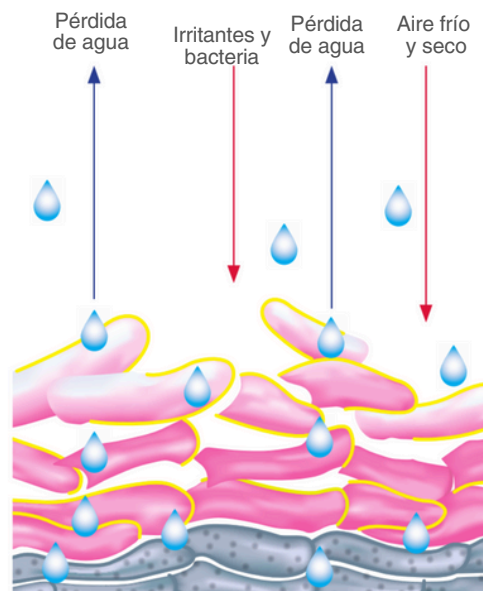

Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

Referencias:

- (1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadaleña G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
- (2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadaleña G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
- (3) Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18

Lámina convexa CeraPlus™

Convexidad

La lámina convexa proporciona a los pacientes una combinación única de fijación y formulación. Indicada para protusión en caso de estoma plano o retraído.

Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día

Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Flexibilidad** que se adapta a los pliegues abdominales para una fijación segura
- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad

Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

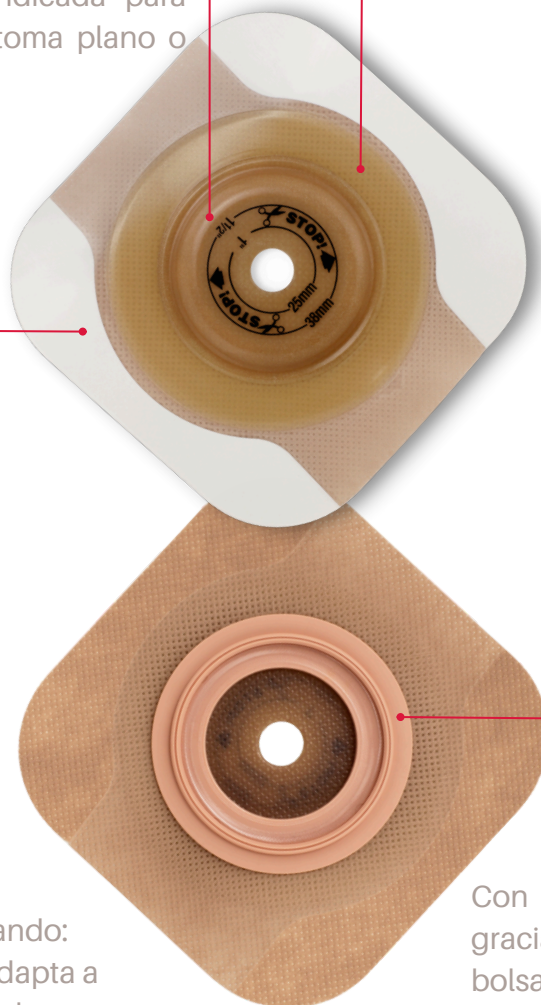


Lámina convexa CeraPlus™+ Bolsa abierta Conform 2

Componentes

Componente	Material
Lámina CeraPlus™	Material hidrocólicoide, ceramidas,
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Estructura convexa	Polietileno de alta densidad
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	Polietileno sin tejer (non woven)
Bolsa	Etilenvinil acetato/cloruro de polivinilideno
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado
Filtro AF300	Carbono activado/película EVA (etilvinilacetato)
Cierre Lock 'n Roll	Solapa con elemento curvo y adhesivo

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Tabla de referencias



Color	Estoma	Aro	C.N.	Ref.	Tamaño
Opaca	∅ 13-25 mm	45 mm	495903	24753	Bolsa Midi 580 ml
	∅ 13-38 mm	55 mm	495911	25753	
Transparente	∅ 13-25 mm	45 mm	495929	24853	
	∅ 13-38 mm	55 mm	495937	25853	



Opaca	∅ 13-38 mm	55 mm	495952	25763	Bolsa Maxi 780 ml
	∅ 13-51 mm	70 mm	495960	27763	
Transparente	∅ 13-25 mm	45 mm	495978	24863	
	∅ 13-38 mm	55 mm	495986	25863	
	∅ 13-51 mm	70 mm	495994	27863	

Cajas con 30 bolsas + 10 láminas convexas CeraPlus™ con ceramidas
Las láminas Convexas CeraPlus™ en caso de necesidad, se pueden adquirir por separado

Todos los productos mostrados en esta página están financiados por el S.N.S.



Los productos CeraPlus™ han recibido la acreditación oficial de la Skin Health Alliance, lo que puede aportar confianza y tranquilidad a tus pacientes.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, Conform 2 y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated. Otras marcas o copyrights son propiedad de sus propietarios.

©Hollister España Julio 2024



*Las láminas CeraPlus contienen la tecnología Remois de Alcare Co., Ltd.

Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es