




Ficha técnica

Pack Conform 2 con Bolsa Abierta + Lámina* plana CeraPlus™

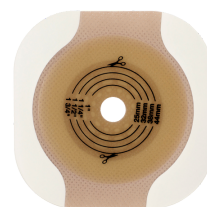

Productos
CeraPlus™

Conform 2 Bolsa abierta

Presillas para cinturón

Integradas en la bolsa para proporcionar una sensación extra de seguridad

Filtro AF300

- Diseñado para permitir una salida lenta del gas y su desodorización, y para reducir el hinchado de la bolsa por gas



Paneles ComfortWear

- Un tejido "sin tejer", de color beige, que recubre por los dos lados la bolsa, en la variante opaca; y por el lado en contacto con el cuerpo en la variante transparente
- El material es suave al tacto y proporciona discreción. El tejido se seca tras el contacto con agua, proporcionando una experiencia de uso confortable.

Cierre integrado Lock 'n Roll con microcierres

- El cierre permite una manipulación muy **sencilla e intuitiva**. En tan solo tres pasos, se pliega sobre sí mismo y se cierra presionando la pestaña ligeramente, desde el centro hacia los extremos, quedando cerrado de modo **seguro** mediante los microcierres.
- Puede abrirse y cerrarse tantas veces como sea necesario y permite un **vaciado controlado** del contenido de la bolsa.
- Se trata de un cierre **higiénico** al permitir una limpieza completa con agua y jabón, y ofrece un gran confort y discreción al quedar replegado sobre si mismo y adaptándose al contorno del cuerpo.

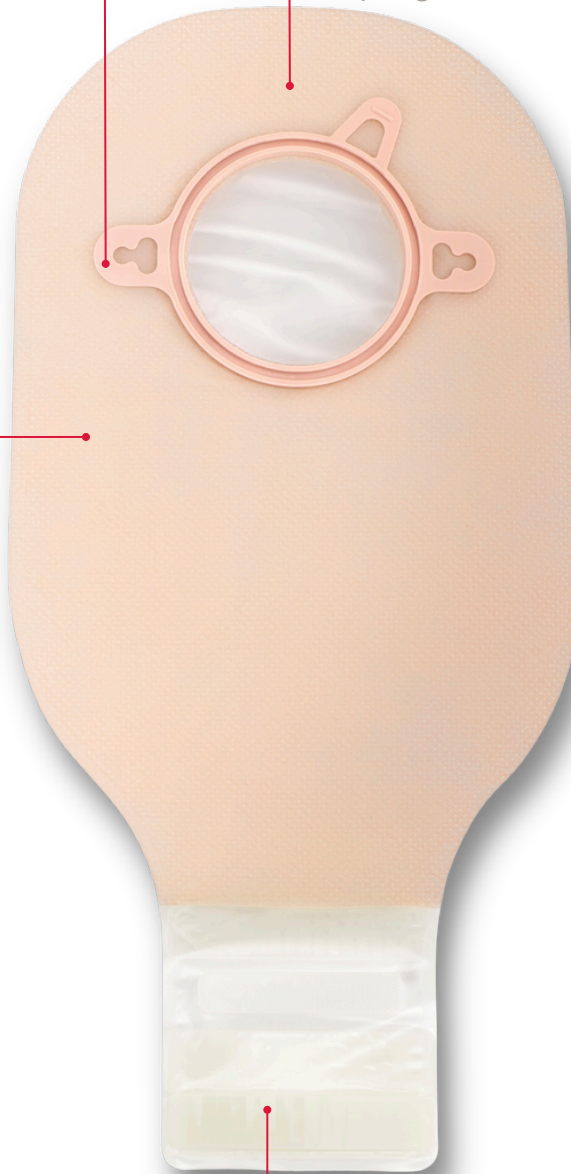


Lámina plana CeraPlus™ + Bolsa cerrada Conform 2

Descripción

La lámina CeraPlus™ está infundida con **ceramidas**, un lípido ceroso que mantiene unidos los corneocitos. La ceramida es un **componente natural** de la piel humana que ayuda a prevenir la pérdida de agua que puede provocar daño o sequedad de la piel. Está diseñada para mantener las propiedades adhesivas así como proteger la barrera de humedad natural y mantener una buena salud de la piel periestomal desde el primer día.

Lo que significa elegir una lámina CeraPlus™



REDUCCIÓN RELATIVA

En el número de Complicaciones de la Piel Periestomal (CPP)¹



MAYOR SATISFACCIÓN en la prevención del picor¹



Significativamente **INFERIOR COSTE RESPECTO AL CUIDADO DEL ESTOMA¹**



Significativamente **MÁS PROBABILIDAD DE RESOLVER CPP**



LA PÉRDIDA DE AGUA TRANSEPIDÉRMICA se reduce^{2,3}




Protección frente **A IRRITACIÓN Y DAÑO EN LA PIEL**

El rol de las ceramidas

Piel Sana

mantiene la humedad dentro y los irritantes fuera

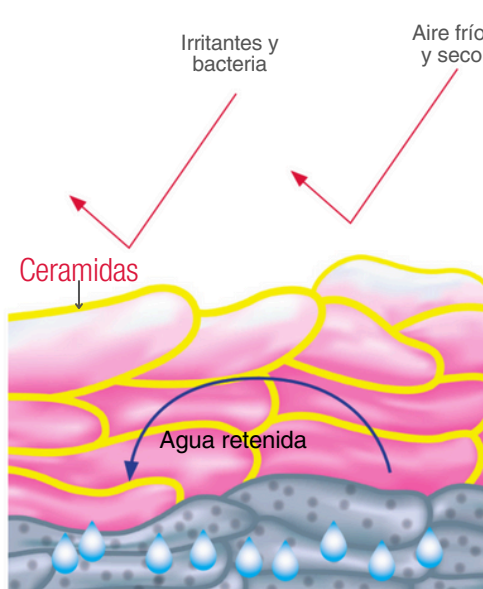


Abundante nivel de ceramidas:

- Más resistente frente a agresiones externas
- Mejor protección frente a la pérdida de agua
- Bien hidratada y flexible

Piel Dañada

Permite la entrada de irritantes y la salida de agua

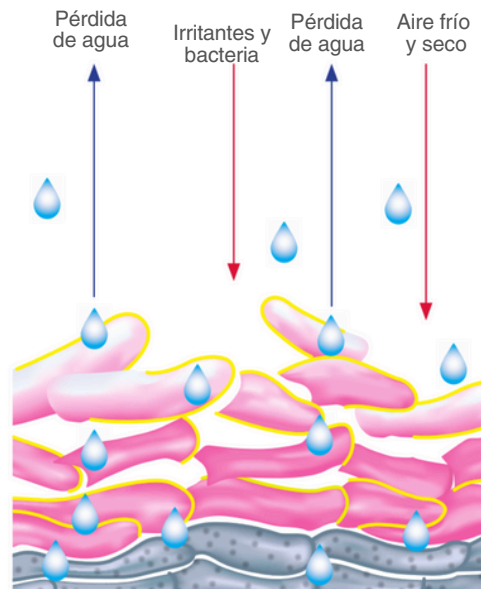

Bajo nivel de ceramidas:

- Más vulnerable a agresiones externas
- Más vulnerable frente a la pérdida de agua
- Susceptible a daños y sequedad

Referencias:

- (1) Colwell J, Pittman J, Raizman R, Salvadaleña G. A Randomized Controlled Trial Determining Variances in Ostomy Skin Conditions (ADVOCATE). J Wound Ostomy Continence Nurs. 2018;45(1):37-42
- (2) Grove G, Houser T, Sibbald G, Salvadaleña G. Measuring epidermal effects of ostomy skin barriers. Skin Res Technol. 2019;25:179-186. <https://doi.org/10.1111/srt.12630>
- (3) Nichols T, Houser T, Grove G. Comparing the skin stripping effects of three ostomy skin barriers infused with ceramide, honey or aloe; Journal of Stomal Therapy Australia 2019; 39(2):14-18

Lámina plana CeraPlus™

Lámina Plana

Diseñada para mantener las propiedades adhesivas y ayudar a proteger la piel.

POSIBLES ESCENARIOS CLÍNICOS

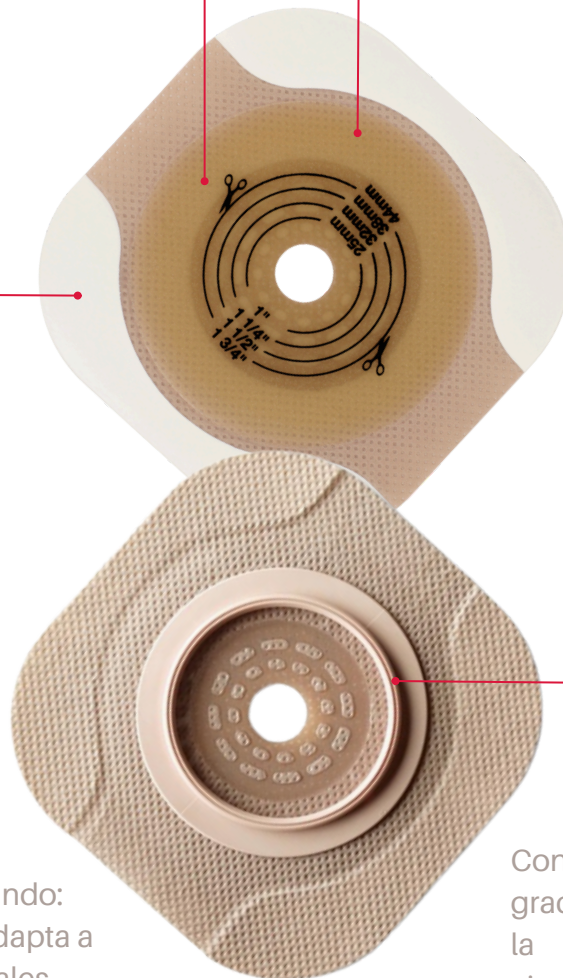


Lámina plana

- Área periestomal plana
- Protusión adecuada del estoma
- Apertura centrada del estoma

Hidrocoloide infundido con ceramidas

- **Protege** la barrera natural de la piel
- **Reduce** la pérdida de agua transepidérmica
- **Mantiene** la piel periestomal sana desde el primer día



Borde Adhesivo

Se adapta a los pliegues abdominales proporcionando:

- **Flexibilidad** que se adapta a los pliegues abdominales para una fijación segura
- **Tranquilidad** con una sensación extra de seguridad



Aro flotante

Con un sencillo y audible clic, y gracias al aro flotante la lámina y la bolsa quedan firmemente ajustadas sin necesidad de presionar el abdomen.

Lámina con plana CeraPlus™+ Bolsa Abierta Conform 2

Componentes

Componente	Material
Lámina CeraPlus™	Material hidrocoloide, ceramidas
Aro Flotante	Polietileno de baja densidad
Borde Adhesivo	Polietileno spunbond
Revestimiento del Borde adhesivo	polietileno sin tejer (non woven)
Bolsa	Etilenvinil acetato/cloruro de polivinilideno
Tejido sin tejer	Polietileno pigmentado.
Filtro AF300	Carbono activado/película EVA (etilvinilacetato).
Cierre Lock 'n Roll	Solapa con elemento curvo y adhesivo

Caducidad: 5 años



Libre de alcohol, látex y ftalatos

Tabla de referencias

Lámina CeraPlus™ plana, con Borde Adhesivo+ Bolsa Abierta Ileostomía

¡Novedad!



Color Bolsa	Tamaño bolsa	Estoma	Aro	C.N.	Referencia
Transparente	Maxi 780 ml	∅ 13-44 mm	55 mm	493270	25867
Opaca	Maxi 780 ml	∅ 13-44 mm	55 mm	493239	25767

Cajas con 30 bolsas + 10 láminas CeraPlus™ Planas | Productos financiados por el S.N.S.



Los productos CeraPlus™ han recibido la acreditación oficial de la Skin Health Alliance, lo que puede aportar confianza y tranquilidad a tus pacientes.

Antes de su uso, asegúrese de leer las instrucciones de uso, para información relativa a Indicaciones de Uso, Contraindicaciones, Advertencias, Precauciones e Instrucciones.

Hollister, el logo Hollister, Conform 2 y CeraPlus son marcas registradas de Hollister Incorporated. No todos los productos tienen marcado CE. Otras marcas o copyrights son propiedad de sus propietarios.

©Hollister España Julio 2024



*Las láminas CeraPlus contienen la tecnología Remois de Alcare Co., Ltd.

Hollister Ibérica S.A.
Avenida de Bruselas 13, 2ºD
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27
www.hollister.es