

Spray Quita Adhesivo



Descripción	C.N.	Referencia
Spray Quita Adhesivo Adapt	346718	7731*

Presentación: caja con 1 botella de 100 ml (peso:76 g)

*Producto no financiado por el S.N.S.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Spray Quita Adhesivo Adapt tiene como función facilitar la retirada de los dispositivos adheridos a la piel. Su misión es facilitar que se despegue el adhesivo de la piel, especialmente cuando se ha utilizado anteriormente el Spray Adhesivo Hollister.

No es inflamable ni irritante.

COMPOSICIÓN CUALITATIVA

Hexametildisiloxano con Isobutano A-31 como propelente.

NO CONTIENE ALCOHOL

El Spray Quita Adhesivo Adapt presenta una base siliconada por lo que resulta un producto respetuoso con la piel, no produce reacción ni irritación y se evapora fácilmente para continuar con el cambio de dispositivo.

MODO DE EMPLEO

- Agitar bien antes de usar.
- Sostener el dispositivo a retirar de forma que la flecha del spray quede justo enfrente.
- Se puede aplicar en 360°
- Para retirar dispositivos de ostomía, levantar una esquina de la lámina y pulverizar la superficie que queda entre ésta y la piel.
- Retirar el resto de lámina con suavidad.



PRECAUCIONES

- No aplicar este producto directamente sobre la piel u otras áreas del cuerpo tales como orificios, ojos, boca, vagina, orificio del pene, heridas sin cicatrizar o piel irritada.
- Inflamable: no pulverizar en una llama, material incandescente, aparato eléctrico o fuentes de calor.
- Mantener alejado de fuentes de calor. No fumar.
- Mantener fuera del alcance de los niños.

Unidad mínima de venta: 1 caja con una botella con 100 ml (peso: 76g)

Dimensiones de la unidad mínima de venta: 4,7 cm x 4,7 cm x 14 cm (largo x ancho x alto)

Caducidad: 5 años

Condiciones de almacenamiento:

- La temperatura de almacenaje no debe exceder de 50°C.
- Evitar la luz directa.
- No pinchar ni quemar el envase.



Hollister Ibérica S.A.
Avda. de Bruselas nº 13, 2º D
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: 91 383 87 27 Fax: 91 766 92 01
www.hollister.es

2023